


PRENDRE LA MESURE DU SOUTIEN-GORGE

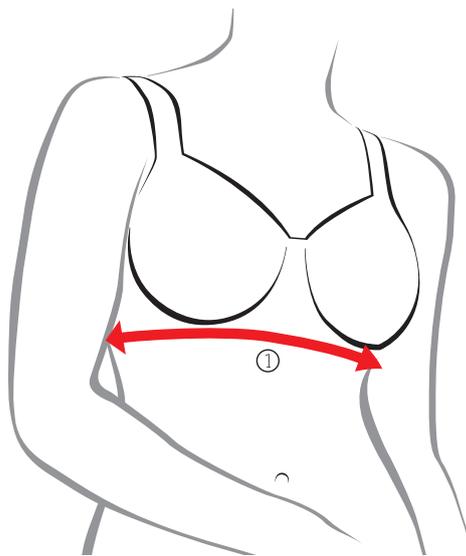

① Mesure du tour de buste

UNE SEULE MESURE À PRENDRE

Mesurez le tour de buste en vous plaçant de profil. Votre patiente est debout, en inhalation maximale, et porte un soutien-gorge confortable. Prenez les mesures sur la bande sous poitrine.

Assurez-vous que **le mètre-ruban** soit bien droit et/ou ne glisse pas vers le haut ou vers le bas.

Une fois la mesure effectuée, reportez-vous au tableau ci-dessus pour déterminer la taille du soutien-gorge à l'aide du repère visuel de couleur.

LEYLA

Style: 44605 Blanc
44606 Noir

Bonnet: Universel
Poches intégrées

TROUVER LA BONNE TAILLE DE SOUTIEN-GORGE

MESURE SOUS-POITRINE					
cm	68-77	78-87	88-97	98-107	108-117
inch	27-30	31-34	35-38	39-42	43-46



BONNETS UNIVERSELS					
EU	70/75	80/85	90/95	100/105	110/115
GB	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
US/CA	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
AU	10/12	14/16	18/20	22/24	26/28
FR	85/90	95/100	105/110	115/120	125/130
Symbole	○	■	△	●	◻



EN UN SEUL COUP D'OEIL

Utilisez le symbole pour trouver rapidement la taille correspondante.

Indications:

- Reconstruction mammaire
- Réduction mammaire
- Augmentation mammaire
- Lifting des seins
- Chirurgie mammaire oncoplastique
- Mastectomie